



**Écran de protection anti-gouttelettes**

## Première utilisation

Saisissez le masque facial et tenez l'élastique d'une main. Tenez le coussin en mousse avec l'autre main. Tirez sur l'élastique et placez le masque facial devant le visage. Tirez l'élastique sur votre tête et placez-le à l'arrière de votre tête.

Vérifiez que la visière est correctement placée.



Usage correct

L'écran facial est destiné à protéger l'utilisateur contre les chutes causées par la toux et les éternuements des patients. L'écran facial doit être jeté immédiatement après utilisation en milieu à risque élevé (services hospitaliers/patients contaminés).

L'écran facial peut être stocké dans des conditions de stockage normales (salle de stockage intérieure, sèche, non chauffée ou chauffée).

L'écran facial n'est pas stérile à la livraison.

### **Attention**

N'utilisez pas d'écran facial s'il est endommagé.

Veuillez noter que les matériaux qui entrent en contact avec la peau peuvent provoquer une irritation cutanée pour certains utilisateurs sensibles lors d'une utilisation prolongée.

Si cela se produit, vous pouvez d'abord essayer d'utiliser un autre écran et voir si cela aide.

Si cela n'aide pas, n'utilisez pas le masque facial jusqu'à ce que l'irritation ait disparu.

### **Sécurité**

La visière est compilée avec le règlement (UE) 2016/425 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 sur les équipements de protection individuelle et abrogeant la directive 89/686 / CEE du Conseil

Le masque facial est conforme à la norme harmonisée EN 166: 2003, protection des yeux, exigences générales.

### **Distributeur France et Suisse**

Société CREE – ZI du Recou -69520 Grigny – France

[cree@cree.fr](mailto:cree@cree.fr) - 04 72 24 08 99

Page ci-après le certificat d'immatriculation obtenu le 17 avril 2020 par la société SEFFCA (Danemark).



**EU OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING**

Identifikation af fabrikanten:

STEFFCA A/S  
Romsøvej 24  
5800 Nyborg  
Danmark

Denne overensstemmelseserklæring udstedes på fabrikantens ansvar for at erklære, at produktet:

Steffca Engangsansigtsvisir, model VI-02, størrelse L, M og S



som ligger i risikokategori:

Risikokategori I

er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende EU harmoniseringslovgivning:

Reference nr.	Titel
2017/745/EU	Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/425 af 9. marts 2016 om personlige værnemidler og om ophævelse af Rådets direktiv 89/686/EØF.

og at følgende harmoniserede standarder:

Nr.	Titel
EN 166:2003	Øjenværn, almene krav

Underskrevet for og på vegne af STEFFCA A/S

Nyborg, d. 17. april 2020

  
Mikkel Steffensen  
Eksportchef, indehaver